



Guide Rapide pour Tire-lait électrique NEPTUN

 Référez-vous au manuel d'utilisation pour une utilisation sécurisée et complète.

Vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation complet sur www.bistos.co.kr.

1. Utilisation Prévue

Indications pour utilisation

Le tire-lait électrique BT-100 est destiné aux femmes allaitantes dans le but d'exprimer et de collecter le lait maternel à domicile. Il peut être utilisé en simple ou double pompage par une seule utilisatrice.

Contre-indications

Il n'existe pas de contre-indication concernant le tire-lait.


2. Description du Produit

Configuration

Lors du déballage de la boîte, vérifiez que tous les composants suivants sont joints. Tous les composants sauf le corps principal sont des consommables.


Nom	Manuel d'utilisation	Adaptateur secteur	Corps principal	Tétine
Forme				
Qté.	1	1	1	1
Nom	Haut de la capsule membrane	Membrane	Bas de la capsule membrane	Connecteur de la tubulure
Forme				
Qté.	1	1	1	2
Nom	Téterelle	Bloc téterelle	Valve	Tubulure
Forme				
Qté.	1	1	1	80cm x 1
Nom	Biberon de recueil/180 ml	Capuchon biberon	Pas de vis	Anti-fuite
Forme				
Qté.	1	1	1	1

- *La couleur du corps principal ou des composants peut être modifiée sans avertissement préalable mais les caractéristiques de performance ne sont pas impactées par ces changements.*

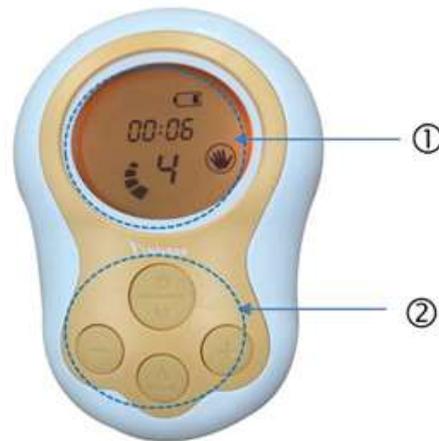

① Ecran LCD avec film protecteur ② Boutons

✘Retirer le film protecteur de l'écran LCD avant utilisation

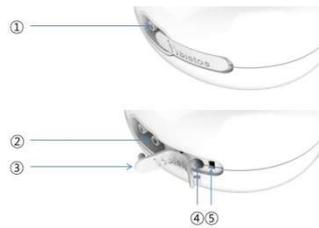

- ① Prise tubulure de base : Prise tubulure pour simple pompage
- ② Prise tubulure auxiliaire : Prise tubulure pour double pompage
- ③ Cache de la prise
- ④ Prise de l'adaptateur
- ⑤ Trou de fixation du cache de la prise


3. Préparation à l'utilisation

3.1 Assemblage de la tubulure et du connecteur



Insérez la partie métallique du connecteur de la tubulure dans l'extrémité de la tubulure comme indiqué sur l'image sur la gauche

3.2 Assemblage et désassemblage

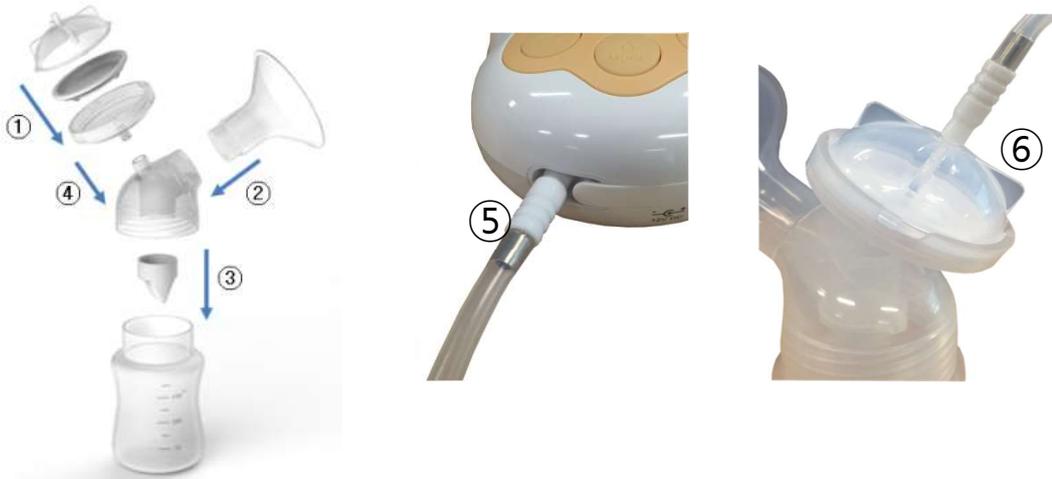


- ① Placez la membrane dans le bas de la capsule membrane dans le sens de la surface à lignes croisées. Couvrez le dessus de la capsule membrane et tournez-la pour la verrouiller.
- ② Placez la tétérelle dans le bloc tétérelle.
- ③ Placez le capuchon de la tétérelle sous le bloc tétérelle. Vissez la bouteille dans la tétérelle.
- ④ Connectez le trou à air du bas de la capsule membrane à la tétérelle.
- ⑤ Connectez la tubulure à la prise tubulure de base sur le corps principal.
- ⑥ Connectez la tubulure au bloc de la bouteille telle que montrée sur la photo.
- ⑦ Pour nettoyer ou ranger après utilisation, désassemblez le biberon dans le sens inverse.

3.3 Ecran



No.	Nom	Statut	Description
①	Mémoire	Off	Pas de séquence de fonctionnement enregistrée
		Clignote	Séquence de fonctionnement en cours d'enregistrement
		On	Séquence de fonctionnement enregistrée
②	Mode Expression	On	Fonctionne en mode expression
		Clignote	Fonctionne avec une séquence du mode expression enregistrée
③	Prise	Off	L'adaptateur d'alimentation n'est pas connecté

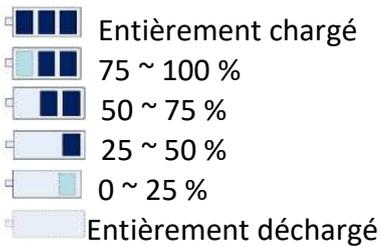	Adaptateur	On	L'adaptateur d'alimentation est connecté
④	Batterie	Niveau d'énergie	<p>Un clignotement signifie qu'un rechargement est nécessaire S'éteint automatiquement quand entièrement déchargé</p> 
⑤	Minuterie	On	Minuterie après mise sous tension. Après 30 minutes, le corps principal s'éteindra automatiquement. Lorsque la batterie nécessite un rechargement, [Lo bt] s'affiche sur l'écran.
⑥	Cadence de pompage	On	La cadence de pompage est affichée en chiffre.
⑦	Mode Massage	On	Fonctionne en mode massage
		Clignote	Fonctionne avec une séquence du mode massage enregistrée
⑧	Cadence de pompage	On	La cadence de pompage est affichée en gradation.

3.4 Modes de fonctionnement

Le BT-100 a deux modes de fonctionnement : une fonction massage/expression (par défaut) et une fonction mémoire pour sauvegarder la séquence de fonctionnement. En utilisant la fonction mémoire, les paramètres du mode massage / expression, la puissance de la cadence d'aspiration et la durée du massage / expression peuvent être sauvegardés et rétablis à tout moment.

(1) Boutons

Chaque bouton possède 3 fonctions. Appuyez brièvement le fera fonctionner avec ses fonctions de base, appuyez environ 2 secondes pour utiliser les fonctions de mémoire et appuyez plus longtemps pour exécuter les fonctions mémoires.

Bouton	Fonction de base	Fonction de fréquence	Fonction Mémoire
	Pression rapide	Pression et maintien court	Pression longue
	Bouton On/Off	-	Démarrage fonction Mémoire / Stop

	Allumez et éteindre	-	<p>Appuyez et maintenez le bouton plus de 2 secondes après avoir allumé le BT-100 pour démarrer la fonction mémoire de la séquence de fonctionnement. Utilisez le BT-100 selon ce que vous souhaitez sauvegarder puis appuyer et maintenez à nouveau pour sauvegarder le programme. Quand la fonction mémoire est activé, l'icône mémoire  clignote sur l'écran LCD.</p> <p>Une fois la séquence de fonctionnement enregistrée, l'icône de mémoire  s'allume. La séquence de fonctionnement enregistrée ne sera pas effacée lors de la mise hors tension.</p>
	Bouton d'augmentation de la vitesse/aspiration	Augmentation de la fréquence	Bouton Stop
	Augmente la vitesse/aspiration du mode de fonctionnement (Niveau 1 ~ 10)	Augmente la fréquence en mode expression	Arrêtez pour utiliser la séquence sauvegardée. Aucune réponse quand ne fonctionne pas selon la séquence sauvegardée.
	Bouton de réduction de la vitesse/aspiration	Réduction de la fréquence	Bouton Start
	Réduit la vitesse/aspiration du mode de fonctionnement.	En mode expression, réduit la fréquence	Commence à fonctionner avec la séquence enregistrée. Aucune réponse si pas de séquence sauvegardée.
	Bouton « Changement de mode »	-	Bouton « Supprimer »
	Bascule du mode Massage au mode Expression	-	Supprime la séquence sauvegardée. L'icône mémoire  s'éteint. Après la suppression de la séquence sauvegardée, le BT-100 fonctionnera selon les derniers paramètres enregistrés. Aucune réponse si pas de séquence sauvegardée.

(2) Comment utiliser la fonction mémoire

Vous pouvez sauvegarder et restaurer les paramètres du mode massage/expression, le niveau de vitesse/aspiration et la minuterie.

- ① Déterminez la séquence de fonctionnement à sauvegarder tel que la séquence du mode massage/expression, le niveau de vitesse/aspiration et la minuterie.
- ② Allumez le BT-100 en appuyant sur le bouton on/off . Appuyez puis maintenez le bouton on/off  à nouveau jusqu'à ce que l'icône mémoire  clignote pour commencer la session Mémoire.

- ③ Utilisez le BT-100 en fonction de la séquence de vous souhaitez enregistrer.
- ④ Après avoir terminé d'utiliser le BT-100, appuyez puis maintenez le bouton on/off  pendant plus de 2 secondes pour sauvegarder la séquence. Une fois la séquence sauvegardée, l'icône Mémoire  s'allume.
- ⑤ Pour utiliser la séquence sauvegardée, appuyez puis maintenez le bouton Play  pendant plus de 2 secondes. L'icône du mode massage  ou l'icône du mode expression  clignote.
- ⑥ Pour arrêter l'utilisation de la séquence sauvegardée, appuyez puis maintenez le bouton Stop  pendant plus de 2 secondes. Le BT-100 fonctionnera selon vos derniers paramètres et le l'icône du mode massage  ou l'icône du mode expression  s'allumera.

⑦ (3) Fonction de Fréquence

Cette fonctionnalité est accessible en mode Expression, et n'affecte pas le niveau d'aspiration.

- ① 3 niveaux de Fréquences sont disponibles (1-3), ils sont sélectionnables durant le mode Expression en appuyant puis maintenant soit le bouton , soit  pendant 1 seconde.
- ② L'écran LCD affiche [CY: --], indiquant le paramètre actuel.
- ③ Ajustez les paramètres de Fréquence en appuyant soit sur le bouton , soit sur .
- ④ La Fréquence sera affichée pendant 4 secondes, puis le pompage reviendra automatiquement sur le mode d'utilisation normal.

Note: Une augmentation de la Fréquence peut être accompagnée d'une augmentation du bruit et de vibrations.

4. Pompage



ATTENTION

- Si vous êtes une mère contaminée par l'Hépatite B, l'Hépatite C ou le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH), pomper le lait maternel ne réduira ou ne supprimera pas le risque de transmission du virus à votre enfant à travers le lait maternel.
- Avant chaque utilisation, inspectez visuellement les composants individuels pour vous assurer qu'ils ne sont pas fissurés, déchiquetés, déchirés, décolorés ou détériorés. Si vous constatez des dommages à l'appareil, veuillez cesser de l'utiliser jusqu'à ce que les pièces aient été remplacées.

4.1 Préparer le pompage

- (1) Lavez-vous soigneusement les mains (au moins une minute) avec du savon et de l'eau avant de toucher le sein et les pièces de la pompe.
- (2) Vérifiez si les composants de la pompe sont usés ou endommagés avant utilisation et les remplacer si nécessaire.
- (3) Assurez-vous que les composants qui entrent en contact avec le lait maternel sont nettoyés et désinfectés de manière appropriée. Assemblez la tétérnelle, la capsule membrane et la bouteille conformément à ce manuel et connectez-les au corps principal via la tubulure.
- (4) Vérifiez que la tubulure est bien connectée pour éviter les fuites d'aspiration.
- (5) Vérifiez la capacité de la batterie et connectez l'adaptateur secteur si nécessaire.
- (6) Masser la poitrine pendant environ 5 minutes avec une serviette chaude pour favoriser l'expression.

4.2 Pompage

- (1) Pour éviter le reflux, pompez toujours lorsque vous êtes assise.



(O)



(X)



(X)



(X)

- (2) Placez la tétérèlle sur votre poitrine de sorte que le mamelon soit centré.
- (3) Allumez le tire-lait sur pompage.
- (4) Ajustez la vitesse /aspiration à un niveau confortable. Augmentez la vitesse/l'aspiration jusqu'à ce que le pompage soit légèrement inconfortable (pas douloureux), puis diminuez-le légèrement pour trouver le niveau confortable.
- (5) Le temps de pompage moyen peut aller de 15 à 30 minutes mais il peut varier d'une personne à une autre.
- (6) Une fois la session de pompage terminée, coupez l'alimentation et glissez un doigt entre la tétérèlle et le sein pour séparer la tétérèlle du sein.

5 Nettoyage

- (a) Nettoyez toutes les pièces avant une première utilisation du BT-100.
 - (b) Nettoyez l'appareil après chaque utilisation à l'aide d'une serviette propre et sèche.
- (1) Dévisser le biberon pour le nettoyer.
 - (2) Rincez toutes les pièces détachées entrées en contact avec un sein ou avec du lait maternel avec de l'eau froide de sorte à retirer tous les résidus de lait
 - (3) Nettoyez dans un lavabo, ou
 - Savonnez toutes les pièces détachées avec de l'eau chaude savonneuse pendant 5 minutes.
 - Nettoyez toutes les pièces avec un torchon ou une brosse.
 - Rincez toutes les pièces détachées avec de l'eau
 - (4) Nettoyez au lave-vaisselle
 - Nettoyez toutes les pièces détachées sur le compartiment haut du lave-vaisselle
 - Laissez toutes les pièces du tire-lait sécher à l'air libre dans un endroit propre.
 - (5) Placez les pièces sur une surface propre et/ou une serviette.
 - (6) Laissez toutes les pièces à l'air libre.
 - (7) Rangez les pièces sèches dans un espace propre et frais. Ne pas ranger les pièces encore humides.

	
<p style="text-align: center;">Corps Principal</p> <p>Lorsqu'il est sale, passez un coup de chiffon propre après chaque pompage</p>	<p style="text-align: center;">Tubulure</p> <p>Ne pas nettoyer la tubulure, remplacer les tubulures endommagées ou sales avec un nouveau set de pompage</p>

 **ATTENTION**

- Désassemblez et nettoyez toutes les pièces qui entrent en contact avec le sein et le lait maternel immédiatement après utilisation de sorte à éviter que le lait ne sèche et pour éviter le développement de bactéries.
 - Uniquement employer de l'eau potable pour le nettoyage
-

6 Dépannage

Pas d'expression ou expression faible	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le bouton d'alimentation. • Assurez-vous que la tétérnelle, la capsule membrane et la bouteille sont correctement assemblés. • Inspectez tous les composants pour vous assurer qu'ils ne sont pas déchirés, fissurés ou pliés.
Batterie non chargée	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'adaptateur soit connecté correctement. • Si vous rencontrez encore un problème avec le chargement, remplacez l'adaptateur par un nouveau.
Ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> • Inspectez le bouton on/off à la recherche de corps étrangers.
Le corps principal est trempé	<ul style="list-style-type: none"> • Débranchez l'adaptateur secteur de la prise. • Eteignez le corps principal. • Essuyez le corps principal avec un tissu sec puis rangez-le dans un espace chaud et sec pendant 12h.
Lait maternel dans une tubulure	<ul style="list-style-type: none"> • Eteignez le corps principal. • Déconnectez la tubulure du sommet de la capsule membrane. • Retirez le lait de la tubulure et de la capsule membrane.

※ Si vous n'avez pas résolu le problème avec le tire-lait or si vous avez des questions, contactez le service client de Bistos.

Service Téléphonique et Numéro de Fax

Téléphone : +82 31 750 0340

Fax. : +82 31 750 0344



Bistos Co., Ltd.

7th FL., A Bldg., Woolim Lions Valley 5-cha, 302,

Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do 13201, Korea

www.bistos.co.kr

bistos@bistos.co.kr

EC REP **Obelis s.a**

Bd. Général Wahis 53

1030 Brussels, BELGIUM

Telephone: + (32) 2. 732.59.54

Fax.: + (32) 2.732.60.03

