



anno Santé

Je loue

mon tire-lait

électrique

connecté



181 rue Jean Monnet - CROIX

[www.annosante.fr](http://www.annosante.fr)



03 20 55 08 26



[contact@annosante.fr](mailto:contact@annosante.fr)



# Tire-lait connecté

## Saturn

Nom de l'application : **Hi Bebe Super**



**Suivre les instructions de l'appli**

### Lancement rapide du Tire lait en mode manuel

Appui court  pour mettre en **marche**.

Appui court  pour commencer en mode de **stimulation** 

Appui court  pour passer au mode d'**expression** 

**Pendant les phases stimulation et expression vous pouvez modifier manuellement la force et la cadence comme suit :**

Appuis courts et répétés pour augmenter  ou diminuer  la pression « **pressure** » (la force d'aspiration)

Appuis courts et répétés pour augmenter  ou diminuer  pour les cycles « **Cycle** » (la cadence d'aspiration).

Appui court  pour **éteindre**.

## Mise en marche simplifiée des programmes 1 à 4

Appui court  pour mettre en marche.

Appuis courts et répétés  pour choisir le programme 1 ou 3 pour le simple pompage et 2 ou 4 pour le double pompage.

Appui long  pour lancer le programme (2 icônes  et  clignotent)

Appui long  pour passer à la séquence suivante.

Appui long  pour arrêter le programme (l'aspiration continue, mais le programme est arrêté).

Appui court  pour éteindre.

## Programmes sur-mesure 5 à 8

Pour créer votre propre programme, référez-vous à la notice d'utilisation disponible sur notre site [www.annosante.fr](http://www.annosante.fr)

## Compléments d'informations

 Allumer/éteindre l'anneau lumineux

Appui long  permet de passer du double au simple pompage et vice versa.


 Vous indique le niveau de la batterie, peut être utilisé sur le secteur.

L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 30 mn.

Pour tout complément d'information, reportez-vous à la notice complète du fabricant que vous trouverez sur le site Anno santé à l'adresse suivante [www.annosante.fr](http://www.annosante.fr). Cette notice simplifiée ne se substitue pas à la notice du fabricant.



Ne pas oublier d'obstruer une entrée en cas d'utilisation en simple pompage.

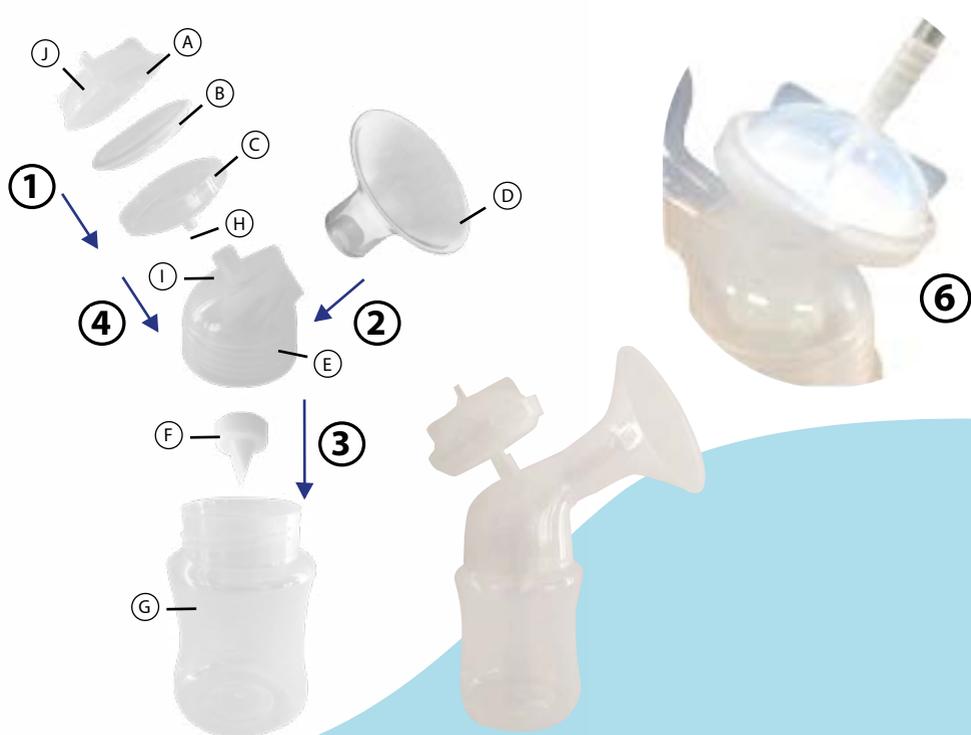

## Assemblage et démontage de la tétérelle

- ① Placer le diaphragme ② dans la membrane inférieure ③ de sorte que la surface réticulée soit dirigée vers le bas. Couvrir avec la membrane supérieure ④ et tourner pour verrouiller.
- ② Insérer la tétérelle ⑤ dans le connecteur ⑥.
- ③ Insérer la valve ⑦ sous le connecteur ⑥. Puis visser le biberon ⑧ sur le connecteur de tétérelle ⑥.
- ④ Connecter la prise d'air de la membrane inférieure du diaphragme ⑨ au connecteur de tétérelle ⑥.
- ⑤ Connecter le tuyau d'un côté à l'accès tuyau primaire du tire-lait et de l'autre côté au bloc biberon comme indiqué sur l'image ci-dessus. ⑥
- ⑦ Pour nettoyer et stocker l'appareil après usage, faire la démarche inverse pour désassembler le biberon.