



anno Santé

Je loue

mon tire-lait

électrique

nomade



Neptun



181 rue Jean Monnet - CROIX

www.annosante.fr



03 20 55 08 26



contact@annosante.fr



Notice de prise en mains simplifiée

Appui court  pour mettre en **marche** ou **éteindre**.

Appui court  pour diminuer la force d'aspiration



Appui court  pour augmenter la force d'aspiration

Appui court  pour passer de Stimulation  à Expression 
et (vice et versa).



Enregistrement d'un programme


Appui court  pour mettre en marche.

Mettre en stimulation  avec la force d'aspiration souhaitée.

Appui long  pour démarrer l'enregistrement de votre programme,
le symbole  clignote.


Augmenter votre stimulation au fur et à mesure et passer ensuite en expression quand vous le souhaitez. Augmenter la force d'aspiration jusqu'à stabiliser à votre ressenti d'une bonne expression.



Appui long  pour terminer l'enregistrement de votre programme.
Le symbole  reste affiché.

Appui long  pour effacer le programme.

Lancement du programme enregistré

Appui court  pour mettre en marche.

Appui long  pour lancer. Le symbole de stimulation  clignote.

Appui long  pour arrêter le programme. Le symbole de l'expression  clignote.

Compléments d'informations

 Vous indique le niveau de la batterie, peut être utilisé sur le secteur.

L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 30 mn.

Pour tout complément d'information, reportez-vous à la notice complète du fabricant que vous trouverez sur le site Anno santé à l'adresse suivante www.annosante.fr. Cette notice simplifiée ne se substitue pas à la notice du fabricant.



Ne pas oublier d'obstruer une entrée en cas d'utilisation en simple pompage.



Assemblage et démontage de la tétérelle

- ① Placer le diaphragme (B) dans la membrane inférieure (C) de sorte que la surface réticulée soit dirigée vers le bas. Couvrir avec la membrane supérieure (A) et tourner pour verrouiller.
- ② Insérer la tétérelle (D) dans le connecteur (E).
- ③ Insérer la valve (F) sous le connecteur (E). Puis visser le biberon (G) sur le connecteur de tétérelle (E).
- ④ Connecter la prise d'air de la membrane inférieure du diaphragme (H) au connecteur de tétérelle (E).
- ⑤ Connecter le tuyau d'un côté à l'accès tuyau primaire du tire-lait et de l'autre côté au bloc biberon comme indiqué sur l'image ci-dessus. ⑥
- ⑦ Pour nettoyer et stocker l'appareil après usage, faire la démarche inverse pour désassembler le biberon.