

Les compresses Hydrogel

Comment les utiliser ?

- Se laver les mains avant d'utiliser le produit.
- Décoller la compresse hydrogel de sa protection plastique.
- Placer délicatement le côté de la compresse avec le gel directement sur votre mamelon. Pour améliorer l'effet apaisant, vous pouvez passer rapidement sous l'eau froide le côté de la compresse avec le gel (1 à 2 secondes), éliminer l'excédent d'eau et attendre 2 minutes avant d'appliquer (ne pas rincer plus de 2 fois par jour).
- Retirer la compresse avant d'allaiter et poser la sur une surface propre dans un endroit sec. (pour une sensation encore plus rafraîchissante, vous pouvez les conserver dans le réfrigérateur.)
- Rincer le sein à l'eau tiède et sécher en tapotant légèrement.
- Ensuite vous pouvez mettre le bébé au sein.
- Après l'allaitement, appliquer à nouveau la compresse d'hydrogel.



Les compresses Hydrogel

Quelles sont les précautions d'emploi ?

- Ne pas utiliser de savons ni de détergents pour nettoyer la compresse.
- Conserver les compresses hydrogel dans un endroit frais et sec.
 - Elle est réutilisable pendant 24 heures.
 - Si la compresse devient trouble ou laiteuse, vous devez la jeter et en utiliser une neuve.
- Tenir hors de portée des enfants, en particulier la protection plastique.
- Si vos mamelons sont crevassés, saignent ou si vous ressentez des sensations de brûlures, contactez votre médecin, consultante en lactation ou sage-femmes.
- Ne pas utiliser la compresse hydrogel si le sachet est ouvert ou endommagé.

Composition

- Eau, glycérol, polymère

